



Innovativ velfærdsteknologi:
NORDIC SENSI®CHAIR

Nordic Sensi® Chair – et moderne sansestimulerende hjælpemiddel

Wellness Nordic Sensi® Chair er en innovativ gyngestol, der bidrager med multisensorisk stimulering af brugerens sanser. Den anvendes som non-farmakologisk, velfærdsteknologisk hjælpemiddel til at berolige mennesker med udadreagerende, urolig adfærd, eller til at øge aktivitetsniveauet hos mennesker med nedsat arousal.

Den har 3 automatiske programmer med moderate, glidende gyng bevægelser, Relax, Refresh og Comfort. De to første programmer varer 20 minutter mens det sidste varer 120 minutter. Den kan indstilles i nøjagtig den position brugeren ønsker, og den har en utrolig komfort. Den er monteret på en vogn med hjul, så den er nem at flytte, ligesom frihøjden på 13 cm betyder, at den kan anvendes gulvlift. For at øge de taktile stimuli, samt for at sikre brugerens oplevelse af tryk, anvendes tyngdedyner, samt positionerende puder sammen med Nordic Sensi® Chair. Se billedet til højre.

Beroligende musik med taktil stimulering

Wellness Nordic Sensi® Chair har to indbyggede højttalere i ryglænet og en basvibration ved lænden. Dette skaber en behagelig taktil stimulering. Stolen bliver leveret med musik fra MusiCure® in Healthcare. MusiCure® er specielt designet original musik med dokumenteret effekt, som beroliger brugeren og skaber en positiv oplevelse.

Musikken er komponeret og produceret af den danske komponist Niels Eje og har gennem talrige internationalt publicerede evidensstudier bevist sin værdi til anvendelse indenfor sundhedsvæsenet. Skabelsen af MusiCure er baseret på mere end 20 års udvikling og forskning i den beroligende og mentalt stimulerende virkning af denne specialkomponerede musik.



Nordic Sensi® Chair er CE mærket som medicinsk teknisk hjælpemiddel i henhold til MDR EN 2017/745, og evidens for stolens kliniske effekt kan rekvireres ved henvendelse til Wellness Nordic.



Kunderne har ordet

Nordic Sensi® Chair markedsføres i dag i mere end 20 lande over hele verden. Tidligere foretog Wellness Nordic A/S en kundeundersøgelse blandt kunder inden for demenspleje med erfaring i anvendelse af Nordic Sensi® Chair. Undersøgelsen blev gennemført i Danmark samt i seks øvrige lande og havde 184 respondenter. 92% af alle respondenter vil meget varmt anbefale Nordic Sensi® Chair til andre professionelle indenfor demensplejen.

Læs mere om, hvordan Nordic Sensi® Chair påvirker respondenternes daglige arbejde på wellnessnordic.com

Løfter niveauet af plejen

I tillæg til den store kundetilfredshed er vurderingen, at Nordic Sensi® Chair også bidrager til at forbedre arbejdsprocesserne i plejen.

- Kunderne oplever, at Nordic Sensi® Chair bidrager til
- at kvaliteten af plejen øges (75%)
 - at arbejdsmiljøet bliver bedre og mere roligt (70%)
 - at personalet får frigjort mere tid (27%).



Anvendelse af sansestimulering med Nordic Sensi®Chair

Der er mange steder indenfor hospitals- og plejesektoren, hvor der er stigende efterspørgsel efter non-farmakologiske hjælpemidler og tilbud, og hvor Nordic Sensi®Chair har bevist sin værdi f.eks.:

- inden for demensplejen
- inden for psykiatrien
- på somatiske hospitalsafsnit
- til børn og voksne, der lider af udviklingsforstyrrelser såsom ADHD, ADD, autisme mv.
- til personer med hjerneskade
- til børn og unge på specialskoler
- på botilbud og døgninstitutioner.

Kundeerfaringer

Specialskole:

"Vores elever har generelt sanseintegrationsproblemer, vanskeligheder med at koncentrere sig i længere tid. I forbindelse med gygningen falder eleverne ofte i søvn, trækker vejret dybt, putter sig og bliver helt stille. Bagefter oplever vi, at de er mere rolige og har energi og overskud til at deltage i resten af dagens aktiviteter. Elevens ro og overskud vil dæmpe den uro, der kan have været omkring eleven."



Akutpsykiatrisk afsnit:

"Evalueringen af effekten af at gynges peger på, at patienter med selvskadende adfærd, angst, depression og uro har godt af at sidde i gystolen. Patienterne opleves at blive mere rolige og mærker sig selv bedre. Ifølge undersøgelsen evaluerer patienterne, at især tristhed og uro bliver lindret, efter de har siddet i stolen. Angstniveauet blev i nogen grad reduceret."



Demensplejehjem:

"Vi har med succes afprøvet Nordic Sensi®Chair på en dement beboer med en meget urolig og råbende adfærd. Han fandt ro og hvile. Han sidder nu mange af sine vågne timer i stolen, hvilket har givet ham mere ro og bedre livskvalitet. Også personalet oplever fordele. Tidligere krævede han pleje og opmærksomhed hvert femte minut – nu er behovet på niveau med dét, vi oplever hos plejehjemmets øvrige beboere. Arbejdsmiljøet er også blevet bedre, da der ikke længere kommer råbestøj fra denne beboer."



Find flere kundereferencer og rapporter om Nordic Sensi®Chair's effekt på www.wellnessnordic.com/dokumentation

Supplerende udstyr



VIBRATIONSMADRAS TIL CARE-MODELLEN

Et multisensorisk redskab, der supplerer Nordic Sensi®Chairs bevægelser med øget sansestimulering i form af vibration, og som giver endnu flere anvendelsesmuligheder for en bredere brugergruppe. Den er specialudviklet til Wellness Nordic Sensi®Chair og Wellness Nordic® Gyngestolen.



TYNGDEDYNER

Vi anbefaler at anvende en tyngdedyne i kombination med Nordic Sensi®Chair og vi tilbyder det brede sortiment af tyngdedyner med og uden taktile stimuli såsom ringdynder, kædedyner og fiberdyner.



U-PUDE

Ved at omslutte brugeren, giver U-puden en oplevelse af afskærmning og afgrænsning, der øger kropsfornemmelsen. Hygiejnebetrækket er i et PU-materiale og kan desinficeres med alkohol. Det er ikke aftageligt. U-puden kan forsynes med et vaskbart komfortetræk, der findes i flere matchende farver.



POSITIONERINGSKIT


Positioneringskittet består af 4 kiler, en halvrolle og en opbevaringsstrop i stolens farve. Det anvendes til at positionere patient/borger sikkert og behageligt samt at stabilisere siddestillingen og forebygge nedadglidning.



TOPBESKYTTELSE

Beskytter toppen af stolens ryg mod skrammer.

Fås med eller uden lomme samt i hvid eller sort.

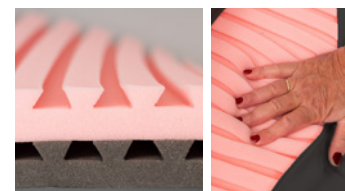

TRYKAFLASTENDE MADRAS

Trykaflastende madras i to-komponent, temperaturfølsomt skum til Nordic Sensi®Chair og Wellness Nordic Gyngestolen. Anvendes til brugere i risikogruppe for tryksår, eller hvis brugeren skal sidde længe i stolen.

Farvekombinationer

Nordic Sensi®Chair leveres som standard i sort eller hvid. Inkontinensbetræk og armlænsovertræk indgår i gyngestolens standardopbygning og kan efter eget valg leveres i fem ekstra farver (se nedenfor). Med i alt 12 farvekombinationer kan man opnå et individuelt udtryk eller lettere tilpasse Nordic Sensi®Chair et specifikt miljø.



Wellness Nordic

Wellness Nordic A/S · Tinvej 20C · DK 3060 Espergærde
Tlf. 3874 5450 · info@wellnessnordic.com · www.wellnessnordic.com



Nordic Sensi®Chair er CE mærket efter de medicinske forordninger, MDR EN 2017/745. Den har afløst Wellness Nordic Gyngestolen® i 2022. Læs mere om øvrige tekniske specifikationer i brugervejledningen eller på www.wellnessnordic.com